

Description

PRESAGE CARE est un dispositif médical breveté de médecine prédictive. Il permet de **suivre à distance l'état de santé d'une personne âgée fragile** et de **prédire le risque de passage aux urgences**.

PRESAGE CARE est un dispositif médical de classe I au titre de logiciel. Pour attester de sa conformité aux exigences de sécurité de santé, il est marqué CE selon la directive 93/42/CEE.

Indications

Télésurveillance médicale d'une personne âgée fragile de 65 ans et plus atteinte d'une ou plusieurs pathologies chroniques, permettant la prévention des hospitalisations non programmées par leurs détections précoces avec 7 à 14 jours d'avance.

Patients éligibles

Patients âgées de 65 ans et plus diagnostiquées fragiles par un professionnel de santé (médecin, paramédical) selon l'une des 3 grilles suivantes : grille de FRIED, grille EVA 13, la Frailty Screening tool (Gérontopôle Toulouse) et souffrants d'une ou plusieurs pathologies chroniques.

Patients non-éligibles

- Patients de moins de 65 ans ou présentant une autonomie GIR 1 (personne âgée confinée au lit) ;
- Patients âgées éligibles à PRESAGE CARE qui refusent l'accompagnement thérapeutique (non consentants).

Bénéfices santé

- L'analyse régulière des réponses du questionnaire permet d'éviter un passage aux urgences en anticipant les décompensations liées aux pathologies du sujet âgé.
- Recommandations médico-sociales personnalisées pour prévenir et anticiper les décompensations liées à l'âge.



Règles de sécurité obligatoires

- Formation à l'utilisation du dispositif, en ligne ou en présentiel, obligatoire pour les patients et les aidants à domicile (professionnels ou familiaux) utilisant PRESAGE CARE.
- Si un même professionnel du domicile suit plusieurs utilisateurs, obligation de vérifier l'identité des personnes suivies à chaque renseignement du questionnaire.

Conditions de performance

- Les utilisateurs de PRESAGE CARE, particuliers et professionnels, sont tenus de mettre régulièrement à jour l'application pour garantir les performances de l'application.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas d'utilisation non adaptée du dispositif et de non respect des règles de sécurité obligatoires.
- PRESAGE CARE n'est pas un dispositif d'urgence et n'est pas toujours fiable à 100%.



Mise en garde

Le non-respect des indications, des règles de sécurité obligatoires ou une utilisation malveillante par un professionnel non associé à PRESAGE peut engendrer un risque, y compris un risque de violation des données des utilisateurs, voire un risque de décès pour le bénéficiaire du dispositif en cas d'altération du signal d'alerte, empêchant l'intervention.



- Dans le cadre de la démarche d'identitovigilance, lorsque PRESAGE CARE est utilisé par un aidant professionnel, un accès nominatif et sécurisé est fourni à chaque observant, qui peut renseigner les informations indépendamment des personnes observées (via un QR code unique).
- La solution PRESAGE CARE permet à plusieurs personnes âgées d'être observées par des personnes différentes.
- Un simple écran permet à l'utilisateur de rejoindre le questionnaire et d'indiquer l'état de la personne.

PARTIE 1 : PREMIÈRE UTILISATION

1



- 1 - Téléchargez l'application PRESAGE CARE sur l'AppStore ou Google Play
- 2 - Dès que l'application est téléchargée, cliquez sur l'icône pour l'ouvrir, l'écran d'accueil s'ouvre et vous êtes rapidement orienté vers un écran d'identification

2

Connectez-vous

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Mot de passe oublié

J'ai lu et accepte les conditions générales d'utilisation


S'identifier

Je n'ai pas encore de compte utilisateur Presage

Votre établissement vous fournit votre identifiant et votre mot de passe est généré à votre première connexion.


Pour se connecter, je rentre :
Mon identifiant :
Mon mot de passe :

3

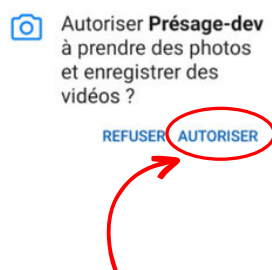

J'autorise PRESAGE CARE à accéder à mon appareil photo.

4

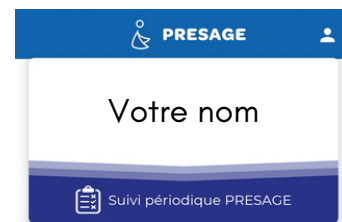


Vous arrivez alors sur la page d'accueil suivante.

A chaque nouvelle connexion vos identifiants et mots de passe vous seront recommandés.

PARTIE 2 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE ÂGÉE

1

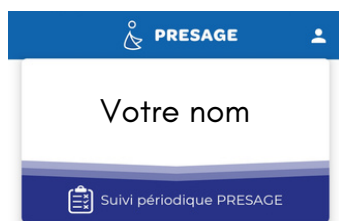

Pour cela, cliquez sur "Suivi périodique PRESAGE"

2




Scannez le QR code de la personne (Ex : QR code de "Jean Balini")

3




Vérifiez que le QR code correspond bien à la personne. S'il n'y a pas d'erreur, cliquez sur "Oui"


PARTIE 3 : REMPLIR LE QUESTIONNAIRE

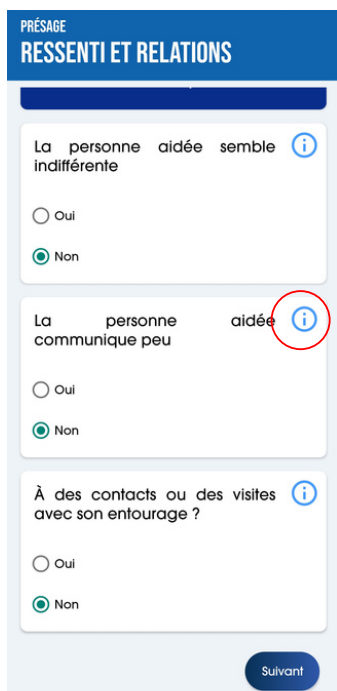

PRÉSAGE
RESSENTI ET RELATIONS

La personne aidée semble indifférente 

Oui
 Non

La personne aidée communique peu 

Oui
 Non

À des contacts ou des visites avec son entourage ? 


Oui
 Non

Suivant


A chaque utilisation (une à deux fois par semaine) vous devez renseigner les 5 pages du questionnaire, correspondant aux 5 thématiques.

Au moindre doute, cliquez sur les bulles informatives pour vous aider.


Renseignez toutes les questions puis cliquez sur "Suivant" pour accéder à la page suivante.

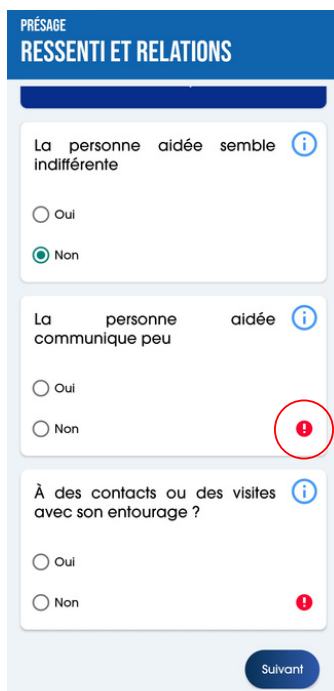


PRÉSAGE
RESSENTI ET RELATIONS

La personne aidée semble indifférente 

Oui
 Non

La personne aidée communique peu 

Oui
 Non

À des contacts ou des visites avec son entourage ? 


Oui
 Non


Suivant


Il est nécessaire de répondre à toutes les questions, pour assurer un suivi optimal de la personne.

Soyez donc vigilant, ne laissez pas une question sans réponse.

Si une question n'est pas renseignée, un pictogramme apparaîtra à côté de la question oubliée.

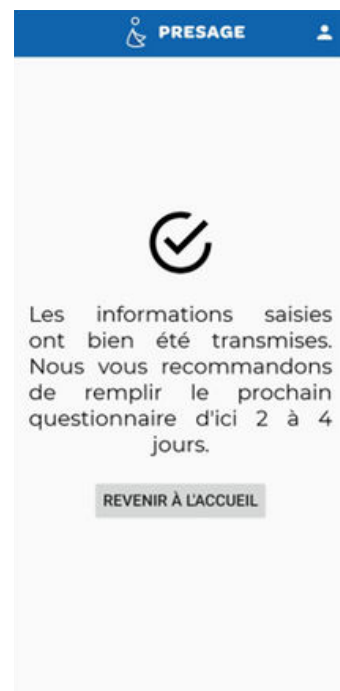

PRÉSAGE 



Les informations saisies ont bien été transmises. Nous vous recommandons de remplir le prochain questionnaire d'ici 2 à 4 jours.

REVENIR À L'ACCUEIL

Une fois le questionnaire rempli, appuyez sur "Envoyer".

Un message de confirmation validera l'envoi.

Analyse

- En fonction de l'état du patient (évolution), PRESAGE CARE calcule un score de risque de passage aux urgences. **Le professionnel de santé chargé du suivi du patient sait instantanément le risque d'un passage aux urgences à 7 jours.**
- Des recommandations sont automatiquement proposées aux services d'aides à domicile. Des recommandations médicales sont également disponibles pour les proches de la personne aidée.

Format papier

Si vous souhaitez recevoir la version papier de la notice d'utilisation, vous pouvez en faire la demande :

- Par mail : qualite@presage.care
- Par voie postale :
PRESAGE
112-114 Rue La Boétie
75008 Paris

La notice d'utilisation sous format papier vous sera envoyée dans les 7 jours à compter la date de votre demande, sans frais supplémentaires.

Versions et mises à jour

- En cas de modification du dispositif et de la notice d'utilisation afférente, vous serez averti par notification. La nouvelle version du document sera disponible dans la partie légale de l'application.
- À tous moments vous pouvez demander le format papier des nouvelles versions de la notice qui vous sera envoyé dans les délais impartis.