

Description

PRESAGE CARE est un dispositif médical numérique breveté de médecine prédictive, conçu pour suivre à distance l'état de santé d'une personne âgée en perte d'autonomie et de prédire le risque d'hospitalisation en urgence. En tant que dispositif médical de classe I au titre de logiciel, PRESAGE CARE est marqué CE conformément à la directive 93/42/CEE, attestant ainsi de sa conformité aux exigences générale de sécurité et de santé.

Indications

PRESAGE CARE est indiqué pour la télésurveillance médicale d'une personne âgée de 75 ans et plus, avec une perte d'autonomie allant de faible à modérée, atteinte d'une ou plusieurs pathologies chroniques permettant la prévention des hospitalisations non programmées par leurs détections précoces avec 7 à 14 jours d'avance.

Patients éligibles

Patients dépendants âgés de 75 ans et plus (GIR 3 à 5) souffrant d'une ou plusieurs pathologie chroniques

Patients non-éligibles

- Personne âgée présentant une autonomie GIR 1 évaluée par la grille AGGIR (personne âgée est confinée au lit).
- Personne âgée éligible à PRESAGE CARE non consentante à l'utilisation de l'outil.

Bénéfices santé

- L'analyse régulière des réponses au questionnaire permet d'identifier les risques de passage aux urgences et d'anticiper les décompensations liées aux pathologies du sujet âgé grâce à une intervention ciblée d'un professionnel de santé.
- Recommandations médico-sociales personnalisées pour prévenir et anticiper les décompensations liées à l'âge.



Règles de sécurité obligatoires

- Une formation à l'utilisation du dispositif, en ligne ou en présentiel, est obligatoire pour les aidants à domicile (professionnels ou familiaux) utilisant l'application mobile PRESAGE CARE.
- Si un même professionnel du domicile suit plusieurs utilisateurs, il est obligatoire de vérifier l'identité des personnes suivies à chaque renseignement du questionnaire.
- Une authentification forte est requise aux professionnels de santé accédant aux données de santé de leurs patients via le dispositif médical PRESAGE CARE.

Conditions de performance

- Les utilisateurs de PRESAGE CARE, particuliers et professionnels, sont tenus de mettre régulièrement à jour l'application pour garantir les performances de l'application.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas d'utilisation non adaptée du dispositif et de non respect des règles de sécurité obligatoires.
- PRESAGE CARE n'est pas un dispositif d'urgence et ne remplace pas le suivi conventionnel.

Mise en garde

Le non-respect des indications, des règles de sécurité obligatoires ou une utilisation malveillante par un professionnel non associé à PRESAGE peut engendrer un risque, y compris un risque de violation des données des utilisateurs, voire un risque de décès pour le bénéficiaire du dispositif en cas d'altération du signal d'alerte, empêchant l'intervention.

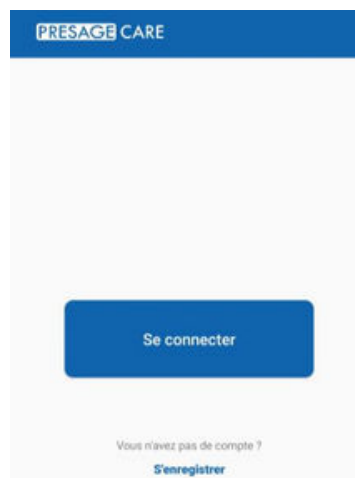
- Dans le cadre de la démarche d'identitovigilance, lorsque PRESAGE CARE est utilisé par un aidant professionnel, un accès nominatif et sécurisé est fourni à chaque observant, qui peut renseigner les informations indépendamment des personnes observées (via un QR code unique).
- La solution PRESAGE CARE permet à plusieurs personnes âgées d'être observées par des personnes différentes.
- Un simple écran permet à l'utilisateur de rejoindre le questionnaire et d'indiquer l'état de la personne.

PARTIE 1 : PREMIÈRE UTILISATION

1

1 - Téléchargez l'application PRESAGE CARE sur l'AppStore ou Google Play

2 - Dès que l'application est téléchargée, cliquez sur l'icône pour l'ouvrir, l'écran d'accueil s'ouvre et vous êtes rapidement orienté vers un écran d'identification

2

Cliquez sur
«Se connecter»

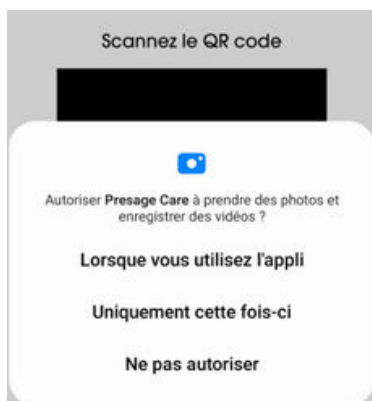
3

Entrez vos identifiants, fournis par votre organisme. Lisez les conditions générales d'utilisation puis cliquez sur « S'identifier »

4

Cliquez sur **« Suivi périodique PRESAGE »**

PARTIE 2 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE ÂGÉE

1

Autorisez l'application à accéder à votre caméra pour pouvoir scanner le QR code (Un QR unique pour chaque bénéficiaire, présent à son domicile)

2

Scannez le QR code de la personne (Ex : QR code de "STEPHANIE CLAUDE")

3

Vérifiez que le QR code correspond bien à la personne.
S'il n'y a pas d'erreur, cliquez sur "Oui"


PARTIE 3 : REMPLIR LE QUESTIONNAIRE



A chaque utilisation (une à deux fois par semaine) vous devez renseigner les 5 pages du questionnaire, correspondant aux 5 thématiques.


Au moindre doute, cliquez sur les bulles informatives pour vous aider.

Renseignez toutes les questions puis cliquez sur "Suivant" pour accéder à la page suivante.



Il est nécessaire de répondre à toutes les questions, pour assurer un suivi optimal de la personne.

Soyez donc vigilant, ne laissez pas une question sans réponse.

Si une question n'est pas renseignée, un pictogramme  apparaîtra à côté de la question oubliée.



Une fois le questionnaire rempli, appuyez sur "Envoyer".

Un message de confirmation validera l'envoi.

Analyse

- En fonction de l'état du patient (évolution), PRESAGE CARE calcule un score de risque de passage aux urgences. **Le professionnel de santé chargé du suivi du patient sait instantanément le risque d'un passage aux urgences à 7 jours.**
- Des recommandations sont automatiquement proposées aux services d'aides à domicile. Des recommandations médicales sont également disponibles pour les proches de la personne aidée.

Format papier

Si vous souhaitez recevoir la version papier de la notice et des guides d'utilisation, vous pouvez en faire la demande :

- Par mail : qualite@presage.care
- Par voie postale :
PRESAGE
112-114 Rue La Boétie
75008 Paris

La notice et les guides d'utilisation sous format papier vous seront envoyés dans les 7 jours à compter la date de votre demande, sans frais supplémentaires.

Versions et mises à jour

- En cas de modification du dispositif et des guides d'utilisation afférente, vous serez averti par notification. La nouvelle version du document sera disponible dans la partie légale de l'application.
- À tous moments vous pouvez demander le format papier des nouvelles versions de la notice et des guides qui vous seront envoyés dans les délais impartis.