

## Description

PRESAGE CARE est un dispositif médical numérique breveté de médecine prédictive, conçu pour suivre à distance l'état de santé d'une personne âgée en perte d'autonomie et de prédire le risque d'hospitalisation en urgence. En tant que dispositif médical de classe I de type logiciel, PRESAGE CARE est marqué CE par conformément à la directive 03/42/CEE, attestant ainsi de sa conformité aux exigences générale de sécurité et de santé.

## Indications

PRESAGE CARE est indiqué pour la télésurveillance médicale d'une personne âgée présentant un risque de perte d'autonomie nécessitant une aide ponctuelle ou régulière.

## Patients éligibles

Personne âgée en risque de perte d'autonomie vivant dans son lieu de vie choisi (domicile, résidence, ...).

## Patients non-éligibles

- Personne âgée présentant une autonomie GIR 1 évaluée par la grille AGGIR (personne âgée est confinée au lit).
- Personne âgée éligible à PRESAGE CARE non consentante à l'utilisation de l'outil.

## Bénéfices santé

- L'analyse régulière des réponses au questionnaire permet d'identifier les risques de passage aux urgences et d'anticiper les décompensations liées aux pathologies du sujet âgé grâce à une intervention ciblée d'un professionnel de santé.
- Recommandations médico-sociales personnalisées pour prévenir et anticiper les décompensations liées à l'âge.



## Règles de sécurité obligatoires

- Une formation à l'utilisation du dispositif, en ligne ou en présentiel, est obligatoire pour les aidants à domicile (professionnels ou familiaux) utilisant l'application mobile PRESAGE CARE.
- Si un même professionnel du domicile suit plusieurs utilisateurs, il est obligatoire de vérifier l'identité des personnes suivies à chaque renseignement du questionnaire.
- Une authentification forte est requise aux professionnels de santé accédant aux données de santé de leurs patients via le dispositif médical PRESAGE CARE.

## Conditions de performance

- Les utilisateurs de PRESAGE CARE, particuliers et professionnels, sont tenus de mettre régulièrement à jour l'application pour garantir les performances de l'application.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas d'utilisation non adaptée du dispositif et de non respect des règles de sécurité obligatoires.
- PRESAGE CARE n'est pas un dispositif d'urgence et ne remplace pas le suivi conventionnel.

## ⚠ Mise en garde

Le non-respect des indications, des règles de sécurité obligatoires ou une utilisation malveillante par un professionnel non associé à PRESAGE peut engendrer un risque, y compris un risque de violation des données des utilisateurs, voire un risque de décès pour le bénéficiaire du dispositif en cas d'altération du signal d'alerte, empêchant l'intervention.

- Dans le cadre de la démarche d'identitovigilance, lorsque PRESAGE CARE est utilisé par un aidant professionnel, un accès nominatif et sécurisé est fourni à chaque observant, qui peut renseigner les informations indépendamment des personnes observées (via un QR code unique).
- La solution PRESAGE CARE permet à plusieurs personnes âgées d'être observées par des personnes différentes.
- Un simple écran permet à l'utilisateur de rejoindre le questionnaire et d'indiquer l'état de la personne.

## PARTIE 1 : PREMIÈRE UTILISATION


1



1 - Téléchargez l'application PRESAGE CARE sur l'AppStore ou Google Play


2 - Dès que l'application est téléchargée, cliquez sur l'icône pour l'ouvrir, l'écran d'accueil s'ouvre et vous êtes rapidement orienté vers un écran d'identification

2

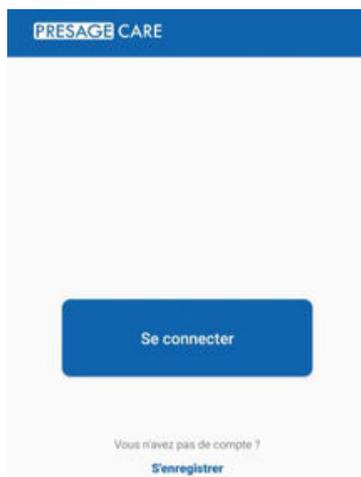

Cliquez sur «**Se connecter**»

3

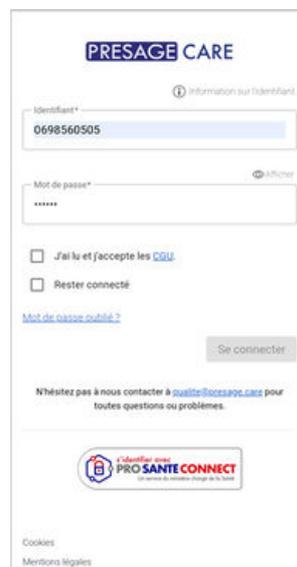

Entrez vos identifiants, fournis par votre organisme Lisez les conditions générales d'utilisation puis cliquez sur « S'identifier »


4



Cliquez sur « **Suivi périodique PRESAGE** »

## PARTIE 2 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE ÂGÉE

1

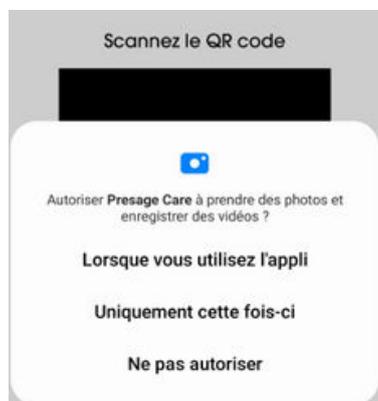


Autorisez l'application à accéder à votre caméra pour pouvoir scanner le QR code (Un QR unique pour chaque bénéficiaire, présent à son domicile)

2



Scannez le QR code de la personne (Ex : QR code de "STEPHANIE CLAUDE")

3

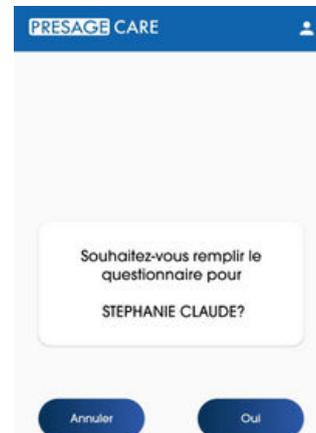

Vérifiez que le QR code correspond bien à la personne. S'il n'y a pas d'erreur, cliquez sur "Oui"

## PARTIE 3 : REMPLIR LE QUESTIONNAIRE

PRESAGE CARE  
RESSENTI ET RELATIONS

2/ Relations avec la personne aidée

La personne aidée semble indifférente

Oui : La personne aidée ne réagit pas ou ne répond pas à ce que vous dites ou faites alors qu'elle vous entend et/ou vous voit.  
Non : La personne aidée réagit à ce que vous dites, à ce que vous faites.

Oui  
 Non

La personne aidée communique peu

Oui  
 Non

À des contacts ou des visites avec son entourage ?

A chaque utilisation (une à deux fois par semaine) vous devez renseigner les 5 pages du questionnaire, correspondant aux 5 thématiques.

Au moindre doute, cliquez sur les bulles informatives pour vous aider.

Renseignez toutes les questions puis cliquez sur "Suivant" pour accéder à la page suivante.

PRESAGE CARE  
OBSERVATIONS

Est passée aux urgences récemment

Oui  
 Non

A été hospitalisée une nuit ou plus

Oui  
 Non

Avez vous d'autres observations à communiquer ?

Oui  
 Non

Rétour Envoyer

Il est nécessaire de répondre à toutes les questions, pour assurer un suivi optimal de la personne.

Soyez donc vigilant, ne laissez pas une question sans réponse.

Si une question n'est pas renseignée, un pictogramme ! apparaîtra à côté de la question oubliée.

PRESAGE CARE

Les informations saisies ont bien été transmises. Nous vous recommandons de remplir le prochain questionnaire d'ici 2 à 4 jours.

REVENIR À L'ACCUEIL

Une fois le questionnaire rempli, appuyez sur "Envoyer".

Un message de confirmation validera l'envoi.

## Analyse

- En fonction de l'état du patient (évolution), PRESAGE CARE calcule un score de risque de passage aux urgences. **Le professionnel de santé chargé du suivi du patient sait instantanément le risque d'un passage aux urgences à 7 jours.**
- Des recommandations sont automatiquement proposées aux services d'aides à domicile. Des recommandations médicales sont également disponibles pour les proches de la personne aidée.

## Format papier

Si vous souhaitez recevoir la version papier de la notice et des guides d'utilisation, vous pouvez en faire la demande :

- Par mail : qualite@presage.care
- Par voie postale :  
PRESAGE  
112-114 Rue La Boétie  
75008 Paris

La notice et les guides d'utilisation sous format papier vous seront envoyées dans les 7 jours à compter la date de votre demande, sans frais supplémentaires.

## Versions et mises à jour

- En cas de modification du dispositif et des guides d'utilisation afférente, vous serez averti par notification. La nouvelle version du document sera disponible dans la partie légale de l'application.
- À tous moments vous pouvez demander le format papier des nouvelles versions de la notice et des guides qui vous seront envoyés dans les délais impartis.